

Hepro Standaard en Coxit trippelstoel



Lees deze handleiding zorgvuldig!

Getest in overeenstemming met de volgende normen en richtlijnen:

EN 12182	EN 1021 - 1
EN 1335-1, 2, 3	EN 1021 - 2
EN ISO 14971	EN 60601-1-2



Trippelstoelen

Handleiding

HEPRO
-easy life



Gebruik:

De HEPRO Standaard en Coxit trippelstoelen zijn ontworpen om mensen met een handicap te helpen. Mensen die het moeilijk vinden om een activiteit uit te voeren in een rechtopstaande positie, en op hetzelfde moment problemen hebben met een beweging tijdens de activiteit. De trippelstoel heeft grote bedieninghendels met duidelijke symbolen en kan eenvoudig worden aangepast zodat deze ergonomisch goed past terwijl er rekening wordt gehouden met de bewegingen van het lichaam. Alle hendels voor de bediening zijn geplaatst aan de rechterzijde van de trippelstoel, de hendel voor de rotatie van de zitting zit aan de linkerkant. De trippelstoel biedt genoeg ruimte voor de benen en is gemakkelijk te verplaatsen en zeer stabiel wanneer deze op de rem staat.

Assembleren en aanpassen van de rugleuning

De trippelstoel wordt geleverd zonder dat de rugleuning is geassembleerd. Om deze te bevestigen dient u de rugleuning voorzichtig in de daarvoor bedoelde gleuf te laten glijden totdat deze stopt. Duw de bevestigingsklem **(A)** zijwaarts en houdt deze ingedrukt. Nu kunt u de rugleuning naar beneden duwen totdat de gewenste hoogte is bereikt en u de bevestigingsklem weer los laat.



Instellen van de armleuning

Duw de pad van de armleuning **(B)** gemakkelijk naar voren of naar achteren. De hoogte van de armleuning **(C)** wordt geregeld door het knopje aan de zijkant, duw deze knop naar boven en schuif de armleuning op de gewenste hoogte. De volledige armleuning kan worden weggeklapt **(D)** door de kunststof onderkant naar beneden te duwen.



Het regelen van de Coxit vlap

Alleen voor model Coxit

Open de wieltjes links of rechts **(E)** en stel de Coxit vlappen in op de gewenste hoek en vergrendel de wieltjes weer.



(E)

Trippelstoelen


Handleiding

HEPRO
-easy life



Bedienen van de zitting, model Gasso

- Til de hendel **(F)** op om de zithoogte te bedienen in de gewenste positie.
- Draai het wiel **(G)** om de hoek van de zitting op de gewenste positie in te stellen.
- Til de hendel **(H)** op om de rughoek op de gewenste positie in te stellen.

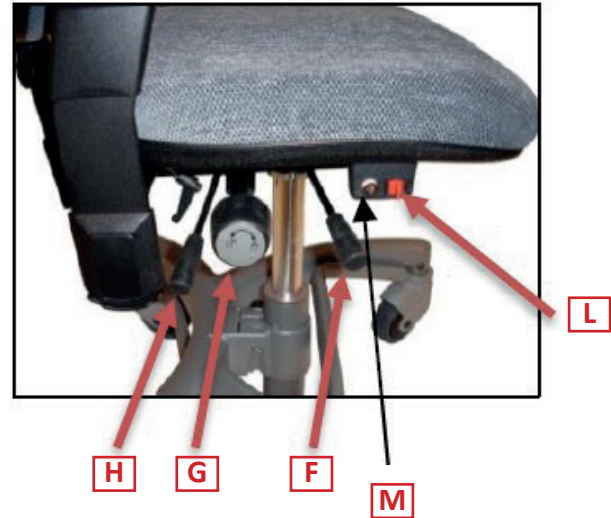

Bedienen van de zitting, model Elektro

- Met de rode knop **(L)** reguleert de zithoogte. Om omhoog te gaan duwt u de knop naar boven, om naar beneden te gaan drukt u de knop naar beneden.
- Het wiel **(G)** en de hendel **(H)** hebben dezelfde functie als bij het model Gasso met gasveer.
- Om het model Elektro op te laden moet u de lader in de laadplug **(M)** steken. Wij raden u aan de trippelstoel één keer per week op te laden.




Bedienen van de zitrotatie

- Til de hendel **(I)** op en de zitrotatie kan worden insteld op de gewenste positie.
- De rotatie kan worden geblokkeerd in positie 4 (elke 90°). Voor de Elektro modellen is dit 3 posities.

Bedienen van de remhendel

- Om de remhendel te plaatsen moeten de 2 schroeven **(O)** los gedraaid worden. De remhendel moet aan de zijkant worden geplaatst, dit kan links of rechts van de trippelstoel. Draai na het plaatsen van de remhendel op de gewenste positie de schroeven weer vast in omgekeerde richting. Gebruik de 2,5mm sleutel die is meegeleverd met de stoel.

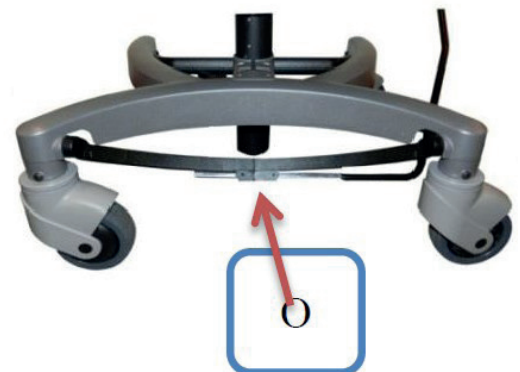

Trippelstoelen Handleiding



HEPRO
-easy life

Reinigen

De stof van de trippelstoel kan gewassen worden in water tot max 60° C. Alle onderdelen van het frame en het chassis kunnen worden gereinigd met een vochtige doek en milde zeep.

Garantie

Mits de trippelstoel wordt gebruikt zoals overeengekomen in deze handleiding zit er op de Hepro trippelstoelen 2 jaar garantie tegen defecten in materiaal en vakmanschap. Om de accu's die worden geleverd bij de Elektro modellen zit een garantie periode van 6 maanden. Indien u garantie klachten of andere vragen heeft over het product verwijzen wij u graag naar uw Hepro dealer. Vermeld bij uw klacht altijd het serienummer van de trippelstoel.

Veiligheid

De trippelstoel is een hulpmiddel en mag nooit gebruikt worden als speelgoed voor kinderen. Het maximale toegestane gebruikersgewicht van 150kg mag niet overschreden worden, dit kan schade leveren aan zowel het product als de gebruiker. Ga niet met uw voet staan op de voetring / steun!!! De trippelstoel zal waarschijnlijk voorover kiepen. Hoewel de trippelstoel is uitgevoerd met een brandvertragende stof mag deze niet worden blootgesteld aan open vuur, gloeiende kooltjes van sigaretten en soortgelijke voorbeelden.

Importeur:

Preston Ability

• Tel. 036 53 53 580 • info@prestonability.com • www.prestonability.com