

Hepro Tilto trippelstoel



Lees deze handleiding zorgvuldig!

Getest in overeenstemming met de volgende normen en richtlijnen:


EN 12182	EN 1021 - 1
EN 1335-1, 2, 3	EN 1021 - 2
EN ISO 14971	EN 60601-1-2



Trippelstoelen

Handleiding

HEPRO
-easy life

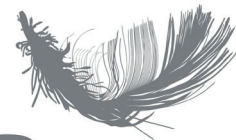


Gebruik:

De HEPRO Standaard en Coxit trippelstoelen zijn ontworpen om mensen met een handicap te helpen. Mensen die het moeilijk vinden om een activiteit uit te voeren in een rechtopstaande positie, en op hetzelfde moment problemen hebben met een beweging tijdens de activiteit. De trippelstoel heeft grote bedieninghendels met duidelijke symbolen en kan eenvoudig worden aangepast zodat deze ergonomisch goed past terwijl er rekening wordt gehouden met de bewegingen van het lichaam. Alle hendels voor de bediening zijn geplaatst aan de rechterzijde van de trippelstoel, de hendel voor de rotatie van de zitting zit aan de linkerkant. De trippelstoel biedt genoeg ruimte voor de benen en is gemakkelijk te verplaatsen en zeer stabiel wanneer deze op de rem staat.

Assembleren en aanpassen van de rugleuning

De trippelstoel wordt geleverd zonder dat de rugleuning en neksteun zijn geassembleerd. Schuif de rugleuning over de daarvoor bestemde buis heen. Til de hendel **(A)** op om de rugleuning volledig naar beneden te laten glijden. Zet de rugleuning op de gewenste hoogte en duw de hendel **(A)** naar beneden om deze te vergrendelen. De Tilto trippelstoel wordt standaard geleverd met een extra hoge rugleuning (EHR) en neksteun. Stop de neksteun in de daarvoor bestemde gleuf bovenop de rugleuning en stel deze in op de gewenste hoogte op de manier zoals hieronder omschreven. De rugleuning heeft een ingebouwde lendensteun die u met de hand kunt oppompen **(B)**.

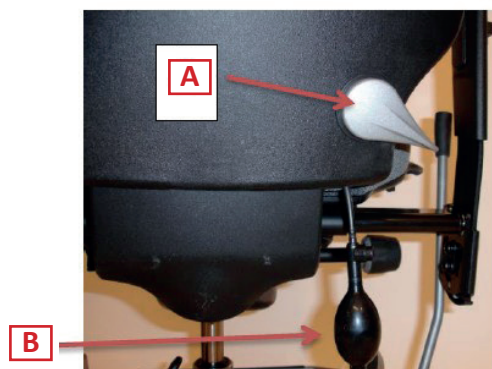

Verstellen van de neksteun

De neksteun kan in hoogte worden veresteld door het naar boven of naar beneden te duwen. Tegelijkertijd kunt u de neksteun ook naar voren of naar achteren verstellen door het kussen naar beneden of naar boven te duwen.



Instellen van de armleuning

Duw de pad van de armleuning **(C)** gemakkelijk naar voren of naar achteren. De hoogte van de armleuning **(D)** wordt geregeld door het knopje aan de zijkant, duw deze knop naar boven en schuif de armleuning op de gewenste hoogte. De volledige armleuning kan worden weggeklapt **(E)** door de kunststof onderkant naar beneden te duwen.



Trippelstoelen

Handleiding

HEPRO
-easy life



Bedienen van de zitting, model Gasso

- Til de hendel **(I)** op om de zithoogte te bedienen in de gewenste positie.




Bedienen van de zitting, model Elektro

- Met de rode knop reguleert u de zithoogte. Om omhoog te gaan duwt u de knop naar boven, om naar beneden te gaan drukt u de knop naar beneden.
- Om het model Elektro op te laden moet u de lader in de laadplug steken, deze zit op dezelfde plek als de knop voor de hoogte verstelling. De stoel moet voor gebruik worden opgeladen. Wij raden u aan de trippelstoel één keer per week op te laden.

De Tilto functies:

- Door het wiel **(G)** open te draaien kunt u de Tilt functie van de zitting gebruiken.
- Til de knop **(H)** op om de rughoek te verstellen.
- Druk de knop **(N)** naar beneden om de zitdiepte te verstellen.
- Met het wiel **(G)** reguleert u de spanning van de veer waarmee de zitting kantelt. Door het wiel met de klok mee te draaien komt de veer steeds strakker te staan en kantelt de zitting dus steeds stroever.
- Met de hendel **(J)** aan de rechterkant kunt u de zitrotatie activeren of deactiveren. (alleen bij modellen met zitrotatie)

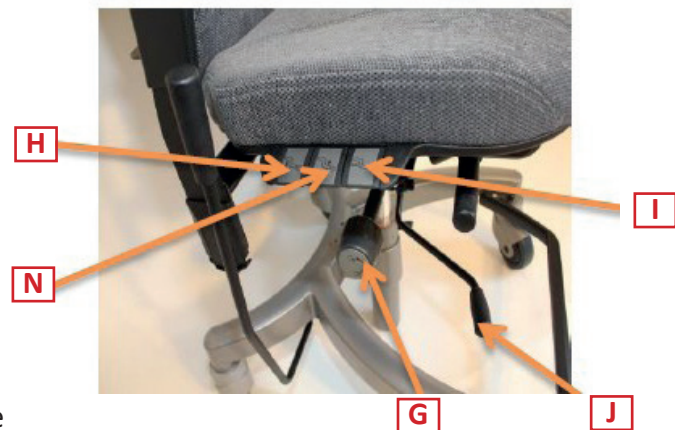

Plaatsen van de remhendel

- De remhendel kan naar de zijkant verplaatst worden door de sluiting te openen. De remhendel kan zowel links als rechts. De positie van de remhendel kunt u vervolgens blokkeren door de sluiting te vergrendelen. Mocht de hendel niet genoeg vergrendeld zijn kunt u met een 3mm sleutel de spanschroef net boven de sluiting zachtjes iets vaster zetten.

Trippelstoelen Handleiding



HEPRO
-easy life

Reinigen

De stof van de trippelstoel kan gewassen worden in water tot max 60° C. Alle onderdelen van het frame en het chassis kunnen worden gereinigd met een vochtige doek en milde zeep.

Garantie

Mits de trippelstoel wordt gebruikt zoals overeengekomen in deze handleiding zit er op de Hepro trippelstoelen 2 jaar garantie tegen defecten in materiaal en vakmanschap. Om de accu's die worden geleverd bij de Elektro modellen zit een garantie periode van 6 maanden. Indien u garantie klachten of andere vragen heeft over het product verwijzen wij u graag naar uw Hepro dealer. Vermeld bij uw klacht altijd het serienummer van de trippelstoel.

Veiligheid

De trippelstoel is een hulpmiddel en mag nooit gebruikt worden als speelgoed voor kinderen. Het maximale toegestane gebruikersgewicht van 150kg mag niet overschreden worden, dit kan schade leveren aan zowel het product als de gebruiker. Ga niet met uw voet staan op de voetring / steun!!! De trippelstoel zal waarschijnlijk voorover kiepen. Hoewel de trippelstoel is uitgevoerd met een brandvertragende stof mag deze niet worden blootgesteld aan open vuur, gloeiende kooltjes van sigaretten en soortgelijke voorbeelden.

Importeur:

Preston Ability

• Tel. 036 53 53 580 • info@prestonability.com • www.prestonability.com